

# Q700<sup>®</sup>

DE ULTIEME RIJERVARING



Q-Serie  
Elektrische rolstoelen



Q700M  
SEDEO PRO HD



Q700  
SEDEO PRO



Q700  
SEDEO PRO ADVANCED



Q700 UP  
SEDEO PRO ADVANCED

**Jarenlange ervaring met hoogwaardige elektrische rolstoelen, zitsystemen, besturingen en de meest innovatieve technologie komen samen in een model. Het resultaat: de ultieme rijervaring!**

**De Q700 is niet alleen een rolstoel, het is een belevenis. Buitenshuis biedt de Q700 goede rijeigenschappen door een krachtige 4-polige motor met hoge koppel. Maximaal rijcomfort krijg je door de tractie en een unieke vering op alle wielen. 3 hoogwaardige zitsystemen zorgen voor het ultieme zitcomfort. Het strakke design met de grote stoere licht-metalen velgen, snelheden tot 12,5 km/u en accu's tot 80 Ah maken de ultieme rijervaring compleet, elke dag!**



# Q700

Q700 biedt voor iedereen een passende oplossing.

- Drie veelzijdige zitsystemen SEDEO PRO, SEDEO PRO ADVANCED en UP SEDEO PRO ADVANCED, van eenvoudige tot complexe zitoplossingen.
- Drie typen aandrijfsystemen (achter -, mid- en voorwiel-aandrijving) passend bij jouw voorkeur en levensstijl.
- Een uitgebreid assortiment aan alternatieve bedieningen (R-Net, VR2, Switch-IT en Link-IT).



## AANDRIJVINGEN

### ACHTERWIEL-AANDRIJVING

#### Q700 MET SEDEO PRO




### MIDWIEL-AANDRIJVING





### VOORWIEL-AANDRIJVING



#### Q700 MET SEDEO PRO ADVANCED

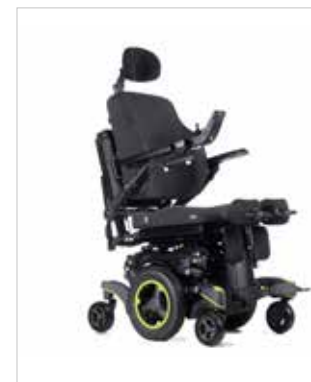

#### Q700 UP MET SEDEO PRO ADVANCED

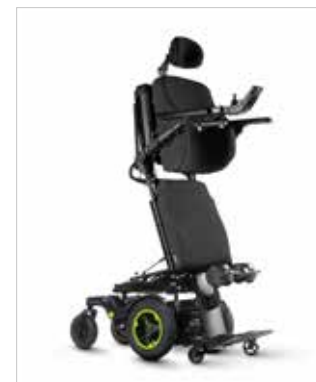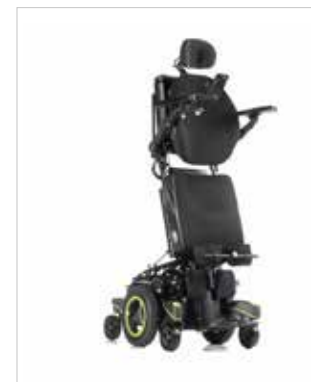





# Q700

## DE ULTIEME RIJERVARING




### MAXIMALE VRIJHEID

Ga er op uit! De krachtige en betrouwbare 4-polige motoren met hoge koppel zorgen voor snelheden van 6, 8, 10 of 12,5 km/u, en in combinatie met de 60 of 80 Ah accu's kun je met vertrouwen lang op pad.



### ALTIJD GOED ZITTEN

In een Q700 zit je altijd goed! Je hebt keuze uit drie zitsystemen SEDEO PRO, SEDEO PRO ADVANCED en UP SEDEO PRO ADVANCED. Ze bieden een hoog zitcomfort, goede positioneringsmogelijkheden en de zitsystemen zijn eenvoudig te bedienen. Met de UP SEDEO PRO ADVANCED kan je zelfs staan!

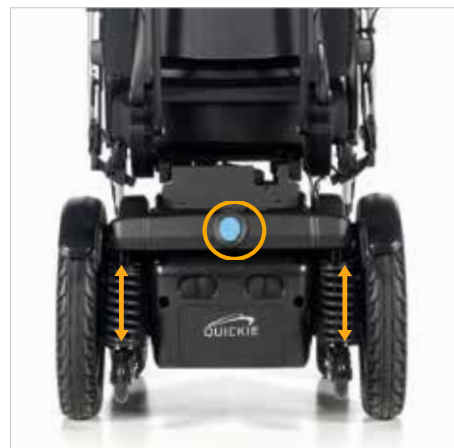

### COMFORTABEL RIJDEN

De Q700 heeft een unieke vering op alle wielen. Dit zorgt ervoor dat het veersysteem schokken absorbeert en niet jij! Daarnaast behouden alle wielen altijd contact met de ondergrond, dit geeft je volledige stabiliteit en maximale tractie op elke snelheid. Veilig en snel dus!



### ONDSCHIEDEND

Laat zien wie je bent! De mat zwarte basis en de stijlvolle bekleding zorgen voor een modern en slank design. Je kunt kiezen uit 7 opvallende accentkleuren. Van bekleding tot wielen, elk detail draagt bij aan een onderscheidende look!




# KIES JE AANDRIJVING

## ACHTER-, MID- OF VOOR- WIELAANDRIJVING

	Q700 R	Q700 M	Q700 F
<b>Aandrijving</b>	Achterwiel	Midwiel	Voorwiel
<b>Draaicirkel</b>	1900 mm	1120 mm	1470 mm
<b>Aandrijfwielen</b>	14"	14"	14"
<b>Zwenkwielen</b>	9/10"	6"	9"
<b>Max. snelheid</b>	6 & 8 km/u (standaard), 10 & 12,5 km/u (optie)		
<b>Accu's</b>	60 Ah; 80 Ah (optie)		
<b>Bedieningen</b>	VR2, R-net	VR2, R-net	VR2, R-net
<b>Max. hellingshoek</b>	10°	10°	8°
<b>Max. obstakelhoogte</b>	80 mm	100 mm	70 mm
<b>Actieradius (ISO 7176-4)*</b>	40 km	40 km	40 km
<b>Min. totale breedte</b>	640 mm	622 mm	640 mm
<b>Totale lengte incl. beensteunen</b>	1100 - 1370 mm	1070 - 1190 mm	1280 - 1340 mm
<b>Min. totale lengte excl. beensteunen</b>	840 mm	950 mm	1030 mm
<b>Max. gebruikersgewicht</b>	160 kg	160 kg	160 kg

De keuze van de aandrijving bepaalt de rijprestaties van de stoel in verschillende situaties en omgevingen. Het is dus belangrijk dat je een aandrijving kiest die aansluit bij jouw persoonlijke voorkeuren, ervaringen, levensstijl, klinische- en omgevingsbehoeften. De Q700 voorziet in die behoefte zodat er altijd een aandrijving is die bij jou past. Welke aandrijving kies jij?

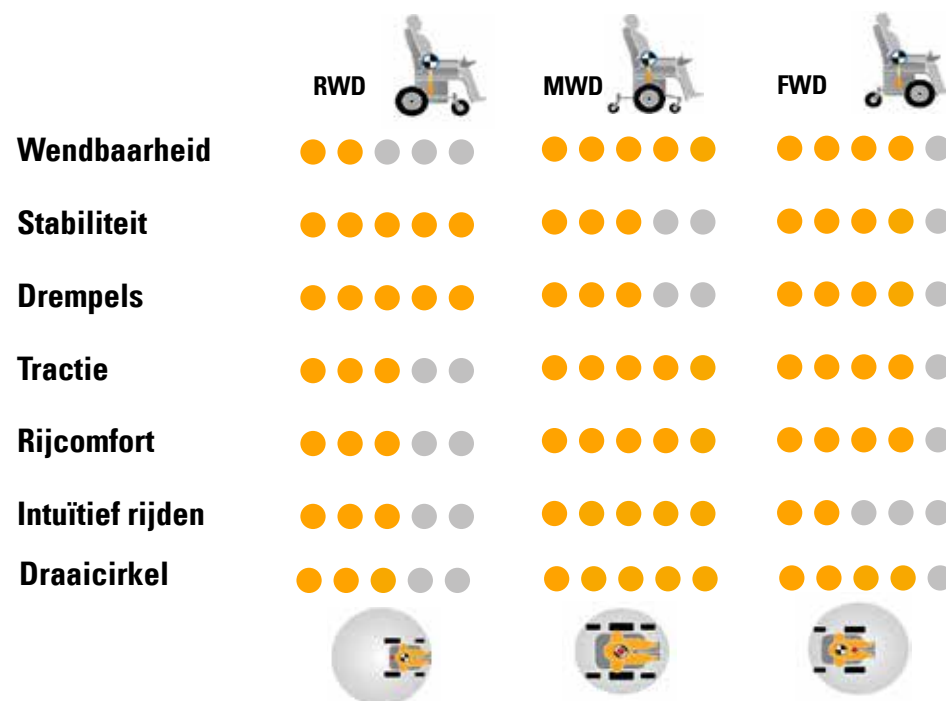

\* De actieradius is berekend onder testcondities. Gewicht, ondergrond en weeromstandigheden kunnen de maximale actieradius beïnvloeden.

## Q700 R

### ACHTERWIELAANDRIJVING

Doordat de aandrijfwielen achter zitten, gebeurt alles voor je. Je ziet dus wat je doet en daardoor is rijden heel gemakkelijk en intuïtief. Een achterwielaandrijving is zeer stabiel door o.a. de grote wielen en daarnaast ook koersvast op alle snelheden, zelfs op oneffen ondergrond. Stoepranden tot 80 mm zijn geen probleem.



## Q700 M

### MIDWIELAANDRIJVING

Door de midwielaandrijving ligt het natuurlijke draaipunt van het lichaam precies boven het draaipunt van de rolstoel. Je rijdt daarom heel intuïtief. Daarnaast is een midwielaandrijving zeer wendbaar en heeft hij ten opzicht van de voor-en achterwielaandrijving de meest compacte draaicirkel.



## Q700 F

### VOORWIELAANDRIJVING

De voorwielaandrijving combineert goede rijeigenschappen voor buiten met optimale wendbaarheid voor binnen. De stoel reageert direct op jou, je manoeuvreert makkelijk overal tussendoor. Doordat je een kleine beenhoek hebt, kun je overal dichtbij rijden en gaan transfers makkelijk.







A close-up photograph of a black Quickie vehicle, likely a motorized wheelchair or scooter. The image highlights the front section, featuring a black body with orange accents. A prominent white logo, consisting of a stylized swoosh above the word "QUICKIE" in a bold, sans-serif font, is centered on the front panel. Above the logo, there are two sets of circular LED lights. Each set contains two lights: one with a clear lens and one with a pink lens. The vehicle is equipped with various mechanical components, including a red horizontal bar, black handlebars with orange grips, and a black control knob with an orange ring. A portion of a black wheel with an orange rim is visible on the right side.

QUICKIE



# COMFORTABEL RIJDEN

## FTSS, SPIDERTRAC<sup>®</sup> 2.0

	Q700 R	Q700 M	Q700 F
<b>Aandrijving</b>	Achterwiel	Midwiel	Voorwiel
<b>Veersysteem</b>	FTSS	SpiderTrac 2.0	FTSS
<b>Vering op aandrijf- &amp; zwenkwielen</b>	Ja	Ja	Ja




### COMFORTABEL RIJDEN - FULL TRACK SUSPENSION SYSTEM

De Q700 voor- en achterwielaandrijving hebben een uitstekende vering op alle wielen. Daardoor kun je comfortabel over obstakels rijden en blijf jij recht in de stoel zitten. Het FTSS-veersysteem op de aandrijfwielen absorbeert kleine maar ook grotere schokken. De aandrijfwielen zijn via een beweegbare brug met elkaar verbonden. Daardoor blijven de wielen ook in bochten en bij obstakels contact houden met de ondergrond, zelfs bij hoge snelheden. De kans op spinning wordt gereduceerd. De zwenkwielen zijn geveerd door een rubberen blok. Dat kun je herkennen aan de accentkleur. Elke dag veilig en comfortabel!



### HOOG RIJCOMFORT - SPIDERTRAC 2.0

Met de midwieler rijd je makkelijk obstakels van max. 100 mm op en af. De stoel reageert intuïtief door de revolutionaire SpiderTrac 2.0-ophanging. Met zijn mechanische armen bewegen alle zwenkwielen onafhankelijk van elkaar en worden alle schokken tijdens het rijden geabsorbeerd. De voor- en achterwielen zijn met elkaar verbonden, waardoor alle zwenkwielen de ondergrond blijven volgen als een spin. Zelfs op hellingen met een hoek van 10°. Daarnaast blijf je controle en stabiliteit houden op stoepen en hellingen met het gepatenteerde anti-pitch-systeem - je stoel kantelt niet naar achteren - dit geeft een extra veilig gevoel!

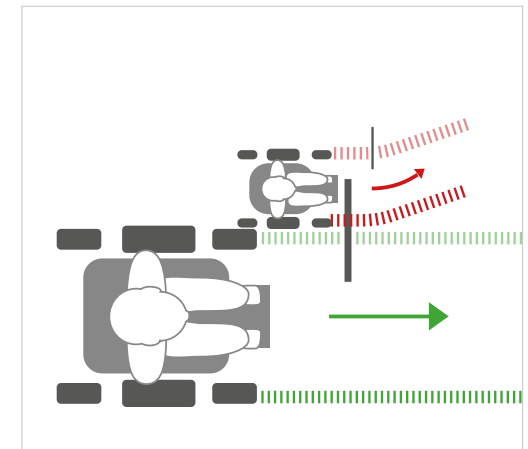

### KOERSVAST OP ELK TERREIN

Lekker volgas rijden! Het (optionele) Gyro trackingsysteem detecteert en corrigeert elke kleine afwijking van de rijrichting die je hebt gekozen. Zo blijf je niet alleen op het juiste spoor op een moeilijke ondergrond, je hoeft zelf ook minder te corrigeren. Dat maakt het rijden minder vermoeiend en je dag plezieriger.

# KIES JE ZITSYSTEEM

## SEDEO PRO, SEDEO ERGO, UP SEDEO ERGO

	SEDEO PRO	SEDEO PRO HEAVY DUTY	SEDEO PRO ADVANCED	UP SEDEO PRO ADVANCED
<b>Klinische behoefte gebruiker</b>	Gemiddeld tot hoog	Gemiddeld tot hoog	Gemiddeld tot hoog	Hoog/staand
<b>Zitbreedte</b>	380 - 560 mm	500 - 660 mm	380 - 560 mm	380 - 560 mm
<b>Zitdiepte</b>	400 - 560 mm	460 - 560 mm	400 - 560 mm	400 - 540 mm
<b>Rughoogte</b>	530 - 720 mm	530 - 720 mm	510 - 760 mm	510 - 760 mm
<b>Sta op- functie</b>	-	-		Ja
<b>Lig- functie</b>	-	-	Ja	Ja
<b>Programmeerbare zitposities</b>	-	-	Ja	Ja
<b>Rughoekverstelling elektrisch</b>	90 / 150°	90 / 150°	85 / 175°	85 / 175°
<b>Rughoekverstelling relaxfunctie</b>	90 - 150°	90 - 150°	90 - 150°	90 - 150°
<b>Lengtecompensatie i.c.m. biomechanische rughoekverstelling</b>	100 mm (optioneel)	100 mm (optioneel)	180 mm	180 mm
<b>Drukontlastingherinnering</b>	-	-	Ja	Ja
<b>Kantelhoek</b>	30° / 50°	30° / 50°	30° / 50°	22°
<b>Hoog/laag</b>	300 mm	-	300 mm	200 mm
<b>Hoog/laag en kantelverstelling</b>	90 - 150°	90 - 150°	90 - 150°	90 - 150°
<b>JAY &amp; WHITMYER opties</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Remote Seating app</b>	-	-	Ja	Ja
<b>Max. gebruikersgewicht</b>	160 kg	250 kg	160 kg	120 kg



### SEDEO PRO

Hoogwaardig, instelbaar zitsysteem met een hoog zitcomfort en makkelijk te gebruiken en te bedienen. SEDEO PRO heeft een uitgebreid assortiment aan armsteunen, armleggers, beensteunen, zitkussens, rugleuningen, hoofdsteunen en positioneringselementen. Zo kan er voor jou de meest optimale zitpositie gecreëerd worden, waarbij je goed stabiel zit en met ondersteuning en bewegingsvrijheid op de juiste plaatsen. Ook kan het zitsysteem achteraf eenvoudig aangepast worden ('meegroeiprincede'), bijvoorbeeld bij veranderende wensen.



### SEDEO PRO HD

SEDEO PRO zitsysteem met specifieke heavy duties opties waaronder grotere zitbreedte en zitdiepte, versterkte zitplaat en armsteunen en posterdelen die qua maat aansluiten bij datgene wat nodig is. Ideaal gecombineerd met het midwiel onderstel zodat maximale tractie en controle tijdens het rijden bewerkstelligd wordt.

## SEDEO PRO ADVANCED

Hoogwaardig zitsysteem met gepatenteerde biomechanische rughoekverstelling en een volledig assortiment aan programmeerbare zitposities. SEDEO PRO ADVANCED ondersteunt je effectief bij drukontlasting en zorgt ervoor dat je gedurende de hele dag goed gepositioneerd zit. Daarnaast heeft het een herinneringsfunctie voor drukontlastig. De biomechanische rug i.c.m. de intelligente positioneringsfunctie voorkomt het risico op onderuit schuiven tijdens het tot zitkomen. Met de C-Me functie is het mogelijk om met geactiveerde zitlift met een hogere snelheid te kunnen rijden



## UP SEDEO PRO ADVANCED

Hoogwaardig zitsysteem met gepatenteerde biomechanische rughoekverstelling en een volledig assortiment aan programmeerbare zitposities en een sta op-functie. Alle voordelen van het SEDEO PRO ADVANCED zitsysteem met als aanvulling een sta-op functie met een sta-hoek tot 85°. De sta-op functie vermindert het risico op decubitus, vergroot je bereik en biedt voordelen voor je gezondheid en dagelijkse activiteiten.





# POSITIONERINGSOPTIES



De SEDEO PRO, SEDEO PRO ADVANCED en ook UP SEDEO PRO ADVANCED zitsystemen hebben een ruim assortiment aan armsteunen, armleggers, beensteunen, zitkussens, rugleuningen, hoofdsteunen en overige positioneringselementen. Daarnaast kunnen ze ook gecombineerd worden met een uitgebreid scala aan WHITMYER hoofdsteunen en JAY zitkussens, JAY rugleuningen en JAY positioneringselementen. Zo bieden we een oplossing voor elke klinische behoefte, en zorgen we voor de best mogelijke positionering.



## DRUKONTLASTING

De biomechanische rughoekverstelling, de kantelverstelling en de centrale elektrische beensteun ondersteunen je effectief bij drukontlasting en zorgt voor een optimale positionering; de hele dag goed zitten! De rughoekverstelling gaat altijd samen met een lengtecompensatie van 100 mm (SEDEO PRO) en 180 mm (SEDEO PRO ADVANCED & UP SEDEO PRO ADVANCED).



## EENVOUDIGE TRANSFERS

Makkelijk je rolstoel in- en uitkomen. De zitsystemen zijn allen voorzien van wegzwenk- of opklapbare armsteunen en wegzwenkbare beensteunen. Daarnaast zijn bij SEDEO PRO ADVANCED & UP SEDEO PRO ADVANCED de laterale zijsteunen ook wegzwenkbaar en uitneembaar. De voetplaat kan bovendien helemaal tot de grond zodat je ook staand een transfer kunt maken. Optioneel zijn de transferhendels, voor extra ondersteuning bij het opstaan.



## ZELF OVERAL BIJ KUNNEN

De hoog/laag- en kantelverstelling zorgen ervoor dat je overal makkelijk bij kunt. Met een zithoogte van slechts 415 mm met SEDEO PRO en 445 mm met SEDEO PRO ADVANCED & UP SEDEO PRO ADVANCED rijd je makkelijk onder een tafel of in een aangepaste auto. Een onafhankelijk leven!



## SNEL IN DE JUISTE ZITPOSITIE

Met SEDEO PRO ADVANCED & UP SEDEO PRO ADVANCED kun je zes zitposities instellen die uniek zijn voor jou. Of je nu wil gaan liggen, koken of tv kijken, met slechts 1 druk op de knop ga je naar de gewenste positie. Gemakkelijk en praktisch!

# SWITCH-IT<sup>®</sup>

## REMOTE SEATING APP




### ZITCOACH


De Remote Seating App, beschikbaar op SEDEO PRO ADVANCED en UP SEDEO PRO ADVANCED, werkt in combinatie met de optionele bluetoothmodule en speelt een belangrijke rol in het drukmanagement. Met deze app kun je zelf je drukverdeling bewaken en, indien gewenst, deze gegevens per mail met je therapeut delen. De app registreert de belangrijkste zitposities zoals zitkanteling, rugverstelling en beenpositie en de tijdsduur van deze posities.

### DATA OVERAL EN WANNEER HET JOU UITKOMT.

De Switch-It Remote Seating App\* meet de zithoeken en registreert de tijd die je in een bepaalde positie zit, om je algemene gezondheid door drukmanagement te verbeteren en decubitus te voorkomen.

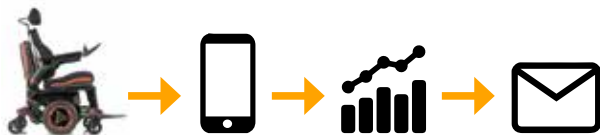

- De optionele bluetooth technologie zorgt voor naadloze verbinding met je rolstoel
- Realtime rapporten kunnen worden gecreëerd voor de hoek en tijdsduur van zitkanteling, rugverstelling en beenpositie
- Rapporten kunnen met therapeuten en artsen gedeeld worden via e-mail
- Helpt bij het opstellen van drukvermindingsplannen
- Geeft een seintje als het tijd is om van positie te wisselen

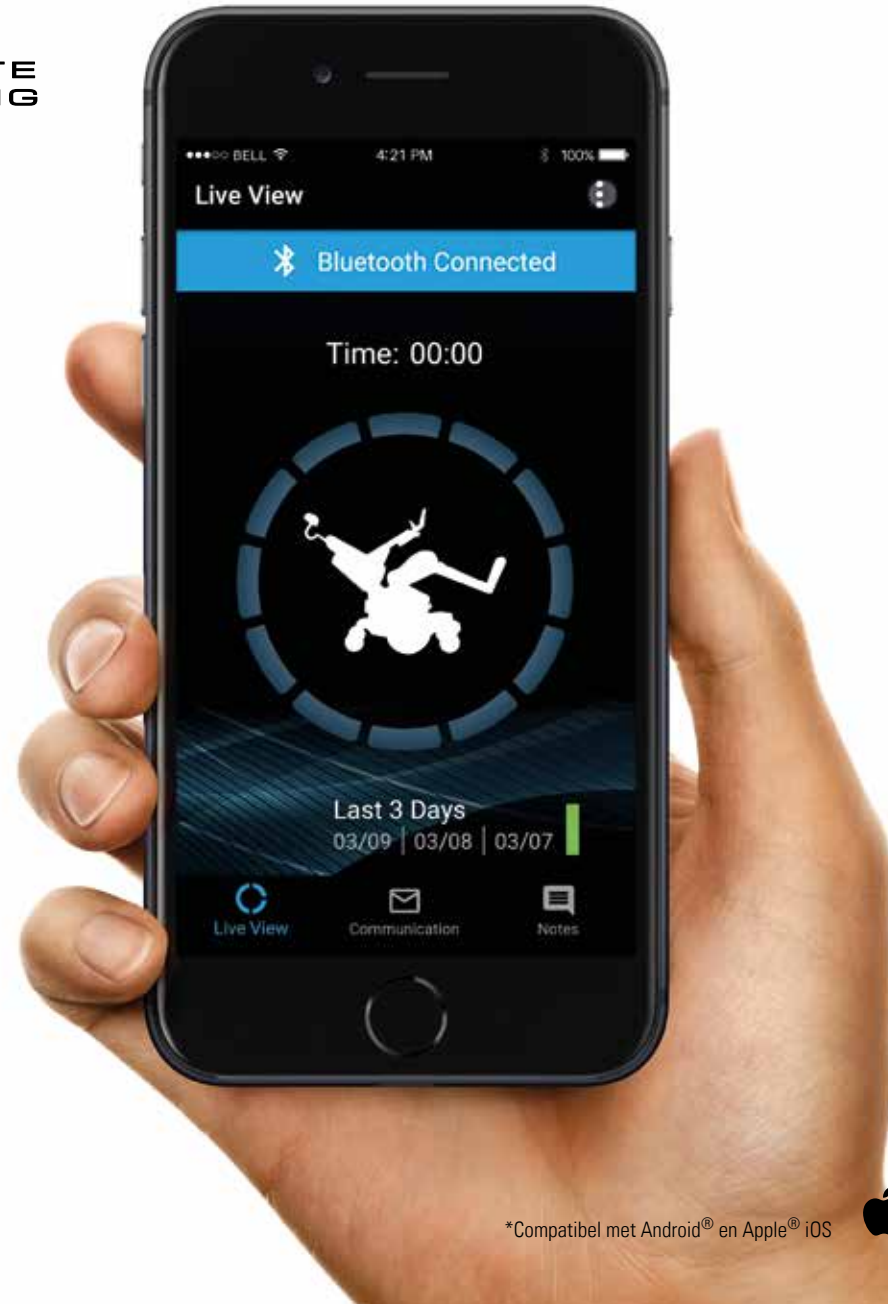

\*Compatibel met Android<sup>®</sup> en Apple<sup>®</sup> iOS



# CONTROLE MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP

Met geavanceerde technologie je omgeving effectief aansturen: bij de Q700 bepaal je niet alleen hoe je je rolstoel bedient, maar stuur je ook je telefoon, laptop of tablet en andere apparaten met infrarood- of bluetoothfunctie aan.





# VR2 & R-NET

## GEAVANCEERDE JOYSTICK

Met de Q700 heb je keuze uit een betrouwbare VR2 bediening of een superieure R-net bediening. Een groot, goed leesbaar HD-scherm en makkelijk te bedienen knoppen, zorgen voor een intuïtieve bediening.

### CONNECT

Met de geïntegreerde infraroodfunctie stuur je je omgeving effectief aan. Home entertainment systemen, tv's, dvd-spelers, docking stations – je bedient ze allemaal eenvoudig met je joystick.

### BLUETOOTH & IDRIVE

Met deze handige optie stuur je ook je telefoon, computer, tablet en andere bluetooth- en i-apparaten aan. Je kunt maximaal vier apparaten verbinden en aansturen.

### QUICKIE'S GEPATENTEERDE TOEWIJSBARE-KNOPPEN-TECHNOLOGIE

Met de gepatenteerde toewijsbare-knoppen-technologie van QUICKIE verander je de functie van elke knop/schakelaar op je bedieningskast. Ook kun je een tweede (lang indrukken) functie toewijzen aan een knop/schakelaar. Zo heb je snel en makkelijk toegang tot de functies die je veel gebruikt – zonder dat je je joystick hoeft te gebruiken. Altijd handig!



# SWITCH-IT<sup>®</sup>


## INNOVATIEVE BEDIENINGEN

---

Snel en makkelijk met de geheugenfunctie naar elke gewenste zitpositie? Met de 5-Switch box stuur je de 5 voorgedefinieerde zitfuncties eenvoudig met een druk op de knop aan.

### ALTERNATIEVE BEDIENINGSOPTIES

Wanneer rijden met een standaard joystick voor jou niet de beste optie is, dan kun je met de alternatieve bedieningen van Switch-IT de instellingen en rijprestaties van je rolstoel volledig benutten.

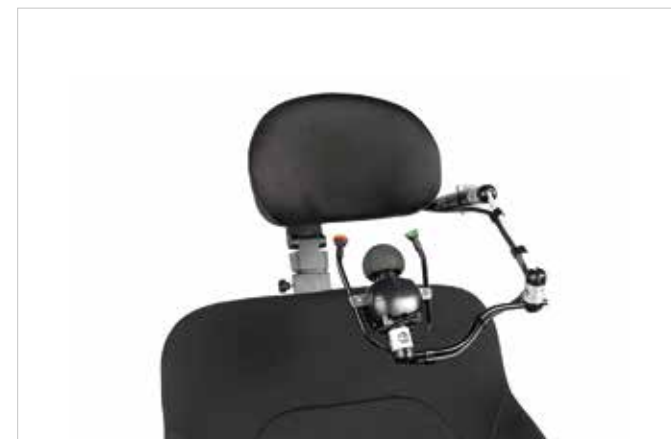

# LINK-IT<sup>®</sup>

## BEVESTIGINGSSYSTEEM

Heb je extra schakelaars of alternatieve bedieningen nodig? Geen probleem. Je bevestigt ze gemakkelijk met het universele Link-IT bevestigingssysteem.

Met de beschikbare modules en staafjes kun je eindeloos veel combinaties samenstellen, en de oplossing creëren die jij nodig hebt. Link-it is niet alleen makkelijk te positioneren; het zorgt er ook voor dat het minimalistische, strakke design van je rolstoel behouden blijft.

Een extra bedieningskast op de armsteun, een drukknop op de rugleuning of een schakelaar op de hoofdsteun? Just Link-it!







  
QUICKIE



## DESIGN

# ONDERSCHEIDEND DESIGN

Met de Q700 hebben we design naar een nieuw niveau getild. De mat zwarte basis in combinatie met de stijlvolle bekleding zorgen voor een modern en slank design.

## EENVOUDIG PERSONALISEREN

Je kunt bij de Q700 kiezen uit 7 opvallende accentkleuren - een mooi contrast met de mat zwarte basis. Wil je eens wat anders? Dan vervang je gewoon de gekleurde inlays. Welke kleur kies jij?



Voor meer informatie over de specificaties, opties en accessoires verwijzen wij je naar het orderformulier.  
Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten, technische wijzigingen en kunnen veranderd worden zonder mededeling.  
De Q700 is succesvol gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem.



**EDUCATION  
IN MOTION**

built4me



[www.SunriseMedical.nl](http://www.SunriseMedical.nl)

[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)